




1. DEFINITII
2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
3. APLICATII
4. PERSONALIZAREA **Andropenis®**-ului
5. Ajustarea **Andropenis®**-ului
6. CURBURA PENISULUI SI BOALA PEYRONIE
7. METODE DE FOLOSIRE **Andropeyronie®** (CURBURA PENISULUI SI BOALA PEYRONIE)
8. METODE DE FOLOSIRE **Andropeyronie® Surgery Edition** (TRATAMENT UROLOGIC POST CHIRURGICAL)
9. MOD DE UTILIZARE **Andropenis®** (PENTRU ALUNGIREA PENISULUI)
10. PRECAUTII DE UZ
11. UNGUENTE

NOTĂ:

Andropenis® are următoarele modele: **Andropenis®** (făcut din aluminiu, versiunea de bază), **Andropenis Gold®** (făcut cu aur, versiunea de lux), **Andropenis Mini®** (pentru penisuri mai mici de 8 CM în stare de erecție), **Andropeyronie®** (făcut din aluminiu, adaptat pentru corectarea curburii), **Andropeyronie® Surgery Edition** (făcut din aluminiu, adaptat pentru uz post operator) și **Androextender®** (făcut din aluminiu, versiunea de bază). Instrucțiunile de folosire sunt aceleași pentru toate modelele.

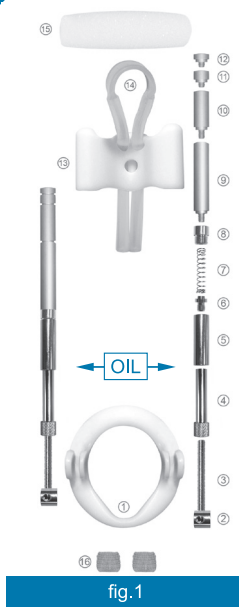

1. DEFINITII

Andropenis® este un aparat medical care se ataseaza de penis pe dinafara si care, in combinatie cu tesuturile penisului, produce o usoara forta de tractiune asupra penisului de mod progresiv si adaptata la necesitatea pacientului. Este indicat pentru aplicatii estetice, medicale si post-chirurgicale. Nota: inainte de prima utilizare consultati medicul si urmati instructiunile lui.

2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Andropenis® este compus dintr-un inel de baza din plastic, doua tije de metal dotate cu arcuri in interior, iar in partea superioara un suport de plastic cu o banda de silicon. Bucatelele de plastic sunt din POM (un material sintetic care nu este inundat de fluidele inflamabile cum ar fi alcoolul). Siliconul din care este facuta banda este unul medical. Partile de metal din care este alcatuit Andropenis sunt acoperite cu aur de 24 carate. Arcurile sunt facute din otel si tijele sunt din aluminiu chirurgical.

NOTA: toate materialele si componentele aparatului sunt fabricate sub standarde de calitate (ISO 133485:2003 si ISO 9001:2008) sunt biocompatibile si un citotoxic (ISO asociate ISO 10993) si uzul sau un are risc sanitar (ISO 14971:2007).

COMPONENTE (fig1): 1-Inel de baza din plastic, 2-Axe din metal, 3- Bara cu filet, 4-Tija ajustabila cu filet, 5-Tija metalica, 6-Surub, 7-Arc, 8-Surub care asigura arcul, 9-Tija mare de 4 cm, 10-Tija medie de 2 cm, 11-Tija mica de 0,5 cm, 12-Tija foarte mica de 0,3 cm, 13-Suport superior din plastic, 14-Banda din silicon, 15-Pernuta de protectie, 16-Inele de silicon.

NOTA: Sfatul nostru este sa puneti o mica picatura de ulei cu ajutorul unei carpe intre partile 4 si 5 pentru ca acestea sa alunece mai usor (vedeti ULEI).

3. APLICATII

- ☑ Dispozitivul este util in tratamentul bolii Peyronie si in corectarea altor devieri congenitale ale penisului.
- ☑ Tratamentul hipogonadismului la bărbații cu micropenis sau penis mic.
- ☑ Tratament estetic pentru alungirea și îngroșarea penisului
- ☑ Tratamentul post chirurgical al unor intervenții chirurgicale la prostata, penis, diverse traumatisme, fractura de penis etc pentru a se evita micșorarea penisului in cadrul procesului de cicatrizare.
- ☑ Îmbunătățește rigiditatea peniană pentru realizarea actului sexual, prin mărirea dimensiunilor (lungime și circumferință) și prin corectarea morfologiei.

Contraindicații: Pacienții cu diabet tip 1, herpes genital, boli cu transmitere sexuala, uretrite si cistite acute, probleme acute ale prostatei, hernie abdominala, dermatite, cancer testicular, cancer limfatic, limfomie, paraplegie și cuadro paraplegie și pacienții in tratament cu anticoagulant. Rezultatele vor fi mici sau nule cand nivelele de testosteron sunt scazute sau sunt an limita minima de lo normal. Nu se recomanda uzul pentru minorii de 18 ani.

Efecte adverse: **Andropenis®** a fost proiectat special pentru uzul medic si utilizarea lui un are efecte secundare daca instructiunile si orientarile din acest manual sunt urmate corect.




4. PERSONALIZAREA Andropenis®-ului

Dimensiunea initiala a dispozitivului este 8 cm. Masurarea se face de la inelul de plastic de la baza pana la capatul tijei de metal (fig 4, initial).

Personalizati Andropenis-ul potrivit dimensiunilor penisului dumneavoastra.

Utilizand un metru de croitorie sau o ruleta, masurati lungimea si grosimea penisului in stare flasca si apoi in cea erecta (fig 2 si 3).

Calculati dimensiunea peronalizata a aparatului scazand 4 cm din dimensiunea penisului dumneavoastra in erectie.

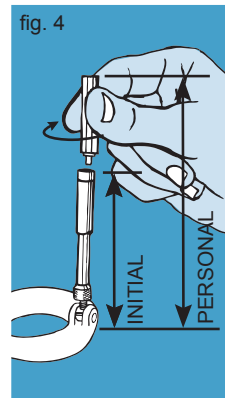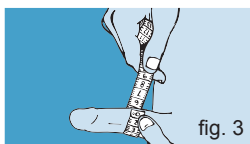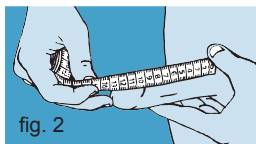

Exemplu: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > **Andropenis®** personalizat = 10.7 cm

Acum pregatiti aparatul ca sa corespunda dimensiunii personalizate. Pentru inceput detasati suportul superior din plastic prin ridicare in sus (fig5), apoi adaugati atatea tije cate sunt nevoie ca sa ajungeti (sau va apropiati cat mai mult dar fara sa depasiti) la dimensiunea personalizata a lui Andropenis (fig. 4. Personal).



Exemplu: Daca dimensiunea personalizata a lui **Andropenis®** este 10.7 cm atunci:

10.7 cm = Andropenis la dimensiunea initiala (8cm) + piesa 10 (2cm) + piesa 11 (0.5cm).

Notă: dimensiunea inițială a Andropenis Mini este de 7 cm. Dacă aveți această versiune începeți cu perioada de adaptare a acestei măsuri (7 cm) și păstrați această măsură timp de 15 zile: în prima zi, folosiți dispozitivul timp de 3 ore, cu trecerea zilelor creșteți treptat timpul de utilizare. După primele 15 zile creșteți timpul de utilizare așa cum este indicat în tabelele de utilizare (vezi mai jos).

5. AJUSTAREA Andropenis®-ului

Introduceți unul din cele două modele de bandă de silicon (piesa 14) care se adaptează mai bine, înăuntrul pernutei protectoare coraspunzătoare mării (piesa 15). Folosirea andro-top-ului este OBLIGATORIE. Introduceți capetele benzii de silicon în gaurile din spatele suportului superior din plastic (piesa 13), astfel încât banda să formeze o buclă.




Cu penisul flasc, strecoara-l în ax împreună cu preputul (în cazul bărbaților fără circumcizie), în ax (fig. 7) și așezați inelul de silicon sub coroana glandului unde se unește cu corpul penisului (santul coronal al zonei preputului -fig. 8-).

Glandul nu trebuie să intre în contact direct cu aparatul. Apoi, trageți penisul în afară pentru a fi întins în stare flască.

Luati inelul de baza (piesa 1), cu partea cea mai îngustă fiind în sus. Potriveste penisul prin inelul de baza (piesa 1) și rezăma-l în adancitura suportului superior de plastic (piesa 13). Așează mâna stângă pe suportul superior (piesa 13) și împinge dispozitivul de corpul tău, presând arcurile interne (fig. 9).

În timp ce păstrezi mâna stângă în aceeași poziție folosește degetele mâinii tale drepte ca să tragi testiculele prin buclă formată de bandă de silicon (fig. 10).

Poziționează degetul mare de la mâna ta stângă deasupra testiculelor pentru a menține penisul la locul potrivit în timp ce gradual descreștem buclă de silicon tragând amândouă capete ale benzii cu mâna dreaptă (fig. 11).

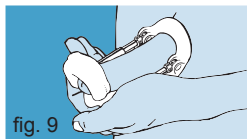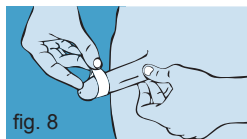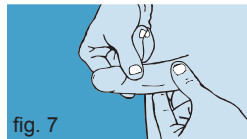


Trage incet din ambele parti pielea penisului catre tine pentru a evita ciupirea pielii sau lasarea unei cute peste canalul dintre testicule (fig. 12).

Glandul trebuie sa ramana putin strans de bucla: suficient pentru a nu iesi dar nici sa doara. Dati drumul mainii stangi si cu grija, asezati extremitile latului in despicatorul posterior al suportului superior (piesa 13) intinzand banda in acelasi timp ce se preseaza in despicatorul. Apasa, dar nu trage in jos, pentru a evita ciupirea (fig 13).

Bucla din silicon ar trebui sa potriveasca canalul testiculelor fara durere dar suficient de strans pentru a evita alunecarea testiculelor. Fixeaza cu grija banda de silicon in clamele suportului superior (piesa 13).

Strange, dar fara sa tragi in jos pentru a evita ciupirea penisul. Asigura-te inca o data sa nu fie pielea peste canal sau sub banda de silicon, daca este, trage pielea catre tine pentru a evita ciupirea ei. Pentru a indeparta Andropenis-ul preseaza arcurile de corpul tau, in jos, elibereaza banda de cauciuc (piesa 14) din clamele suportului superior (piesa 13) si mareste bucla din silicon pentru a elibera penisul.

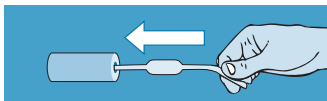

Andropenis® are un sistem de fixare a glandului printr-o bandă numită **Androcomfort®**. Dispune de doua modele: Androcomfort banda si Androsilicone. Androcomfort banda permite uzul si mai comod de **Andropenis®**. Este localizat între gland și trunchiul penisului, șanțul coronal al zonei prepuțului.

Andropenis® are un inel din silicon care funcționează ca un sistem tampon folosind forța de tracțiune numit **Androring®**. Se află între gland și trunchiul penisului, șanțul prepuțului coronal.

Andropeyronie® are o parte superioară din plastic (Androsupport) adaptat pentru corectarea curburilor penisului (vezi anexa "Ghidul de utilizare al Androsupport-ului").


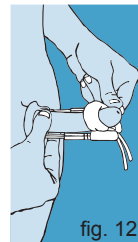


fig. 12



fig. 13

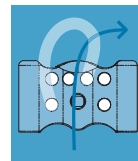

6. CURBURA PENISULUI SI BOALA PEYRONIE

Informatie medicala bazica: Penisul este format din doua coloane de tesuturi spongioase numite corpus cavernosa si o conducta numita uretra, unde se afla urina din corp. Aceste corpa cavernosa sunt inconjurate de un manson din tesuturi elastice numite tunica albuginea.

Exista doua tipuri de curburi ale penisului:

-  **Boala Peyronie** (poate aparea la orice varsta).
-  **Curbura congenitala a penisului** (intalnita de obicei la tineri).



Boala Peyronie sau rigidizarea penisului este un proces a carui cauza este necunoscuta si este caracterizata de o banda fibroasa (tare) pe tunica albuginea a penisului. Aceste benzi tind sa fie unilaterale (pe o parte a penisului) si ca rezultat penisul formeaza o curbura cand este in erectie.

Cele mai comune simptome sunt deformatiunile penisului, durere in timpul erectiei si probleme cu erectia. Raspandirea ei este de aproximativ 1% din populatia barbatilor caucasieni. 74% din cazuri se petrec la barbatii cu varste cuprinse intre 45 si 60 de ani.

Obtineti de tratament medical:

-  **Verapamil:** injectii in plaga fibroasa pentru a bloca productia de collagen (se intreprind studii si cu injectii cu Interferon).
-  **Andropeyronie®:** proteza un implantabila de penis ce ai transmite o tractiune cu reducere de pana la 50% de la curbura.
-  **Vitamina E:** luata oral ca un prim ajutor.
-  **Tratamentul combinat:** Andropenis plus Verapamil plus vitamina E. Combinatia acestor metode a fost propusa pacientului ca protocol medical pentru tratarea bolii Peyronie. Consultati intotdeauna urologul dumneavoastra inainte de a incepe orice tratament.
-  **Operatia:** indepartarea placii fibroase sau implantarea unei proteze externe, dar intotdeauna produce ca efect secundar micșorarea penisului, pentru a evita sa se utilizeze intinzatorul de penis (**Andropeyronie® Surgery Edition**).

Curbura congenitala a penisului, intalnita la tineri. Aceasta problema isi are originea in faptul ca corpa cavernosa a crescut mai mult decat uretra; facand ca erectia sa se curbeze in jos sau intr-o parte. Optiunile de tratament sunt operatia, si/sau aplicarea lui **Andropeyronie®** pe o perioada de 6 luni.

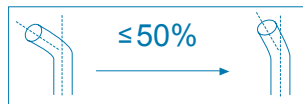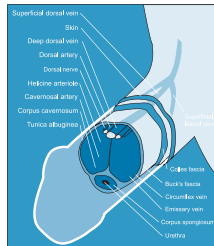

7. METODE DE FOLOSIRE Andropeyronie® (CURBURA PENISULUI SI BOALA PEYRONIE)

Tratamentul obisnuit, exceptie prescriptie medicala diferita, consta in 2 perioade:

- ❑ O perioada de adaptare care dureaza 15 zile.
- ❑ O perioada evolutiva, constand in 3 faze diferite: faza evolutiva initiala (prima si a doua luna), faza intermediara (a treia si a patra faza) si faza evolutiva finala, care incepe in a cincea luna.


Orice deviatie de la program poate modifica rezultatele obtinute (consulta-ti medicul).

	MARIMEA DISPOZITIVULUI	SI DURATA ZILNICA
	Perioada de adaptare	
Primele 5 zile	Marimea initiala	cate 3 ore
Ziua 6-10	Adauga 0.5 cm tija (piesa 11).	6 ore
Ziua 11-15	Adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	8 ore
	Perioada evolutiva	
Prima si a doua luna	Adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 7 zile	cate 9 ore
A treia si a patra luna	Adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 10 zile	9 ore
A cincea luna	Adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 15 zile	9 ore

Nota: pentru propriul tau confort din luna a cincea inainte este posibil sa adaugi la inceput 0.3 cm de tija (piesa 12) si cateva zile mai tarziu sa o schimbi cu 0.5 cm tija (piesa 11) pentru a face tractiunea mai progresiva.

In prima zi, ca practica, fixeaza si scoate dispozitivul de zece ori la rand. In caz de curbura, este recomandat sa pozitionam dispozitivul departe de curbura. La fiecare doua ore dispozitivul va trebui scos pentru a permite tesuturilor sa se relaxeze. Dupa luna a cincea aceasta perioada de pauza se va face la fiecare ora si jumatate. Foloseste aceasta perioada pentru a masa incet penisul. Spala dispozitivul cu sapun si apa la fiecare 4 zile.

Fii rabdator si consecvent cu tratamentul, aceasta este cheia in a-ti indeplini obiectivele. Primele rezultate pot fii observate dupa o luna si jumatate (cele 15 zile de adaptare urmata de prima luna de tratament).

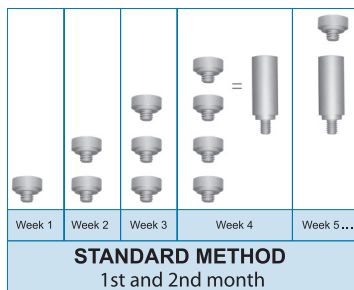

8. METODE DE FOLOSIRE Andropeyronie® Surgery Edition (TRATAMENT UROLOGIC POST CHIRURGICAL)

Daca operatia este simpla este recomandata folosirea lui **Andropeyronie® Surgery Edition** dupa 15 zile de la operatie

Daca operatia este foarte complexa se recomanda folosirea lui **Andropeyronie® Surgery Edition** la o luna dupa interventie.

Intotdeauna sa consultati chirurghul dumneavoastra ca sa va sfatuiasca la cat timp dupa interventia chirurgicala sa folositi **Andropeyronie® Surgery Edition** si durata de folosire.

Tratamentul obisnuit, ecceptie prescriptie medicala diferita, consta in 2 perioade:

- 📅 O perioada de adaptare, care dureaza 15 zile.
- 📅 O perioada evolutiva, constand in 2 faze diferite: Faza evolutiva initiala (prima si a doua luna) si faza evolutiva finala, care incepe in a treia luna.

Orice deviatie de la program poate modifica rezulatele obtinute.

	MARIMEA DISPOZITIVULUI SI	DURATA ZILNICA
	Perioada de adaptare	
Primele 5 zile	marimea initiala	3 ore
Ziua 6-10	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	6 ore
Ziua 11-15	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	8 ore
	Perioada evolutiva	
Prima si a doua luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 7 zile	cate 8 ore
Din luna a treia	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare luna	8 ore

Nota: pentru propriul tau confort din luna a cincea inainte este posibil sa adaugi la inceput 0.3 cm de tija (piesa 12) si cateva zile mai tarziu sa o schimbi cu 0.5 cm tija (piesa 11) pentru a face tractiunea mai progresiva.

In prima zi, ca practica, fixeaza si scoate dispozitivul de zece ori la rand. In caz de curbura este recomandat sa pozitionam dispozitivul departe de curbura. Este recomandat sa pozitionam dispozitivul intr-o zi in sus, intr-o parte in urmatoarea zi, si pe cealalta parte in urmatoarea zi. La fiecare doua ore dispozitivul va trebui scos pentru a permite tesuturilor sa se relaxeze. Dupa luna a cincea aceasta perioada de pauza se va face la fiecare ora si jumatate. Foloseste aceasta perioada pentru a masa incet penisul. Spala dispozitivul cu sapun si apa la fiecare 4 zile. Fii rabdator si consecvent cu tratamentul, aceasta este cheia in a-ti indeplini obiectivele. Primele rezultate pot fii observate dupa o luna si jumatate (cele 15 zile de adaptare urmata de prima luna din tratament).



9. MOD DE UTILIZARE Andropenis® (PENTRU ALUNGIREA PENISULUI)

Tratamentul obisnuit, exceptie prescriptie medicala diferita, consta in 2 perioade:

- 📌 O perioada de adaptare care dureaza 15 zile.
- 📌 O perioada evolutiva, constand in 3 faze diferite: Faza evolutiva initiala (prima si a doua luna), faza intermedia (a treia si a patra luna) si faza evolutiva finala, care incepe in a cincea luna.

Orice deviatie de la program poate modifica rezultatele obtinute (consulta-ti medicul).


Practica medicala recomanda alegerea intre doua modele de uz:

	METODA STANDARD			METODA SPECIALA	
	MARIMEA DISPOZITIVULUI SI	DURATA ZILNICA		MARIMEA DISPOZITIVULUI SI	DURATA ZILNICA
	Perioada de adaptare			Perioada de adaptare	
Primele 5 zile	Marimea initiala	3 ore	Primele 5 zile	Marimea initiala	4 ore
Ziua 6-10	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	6 ore	Ziua 6-10	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	4 ore
Ziua 11-15	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	8 ore	Ziua 11-15	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	4 ore
	Perioada evolutiva			Perioada evolutiva	
In prima si a doua luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 7 zile	cate 9 ore	In prima si a doua luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 3 zile	cate 4 ore
Din luna a treia	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 10 zile	9 ore	Din luna a treia	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 10 zile	4 ore
Din luna a cincea luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 15 zile	9 ore	Din luna a cincea luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 15 zile	4 ore

Nota: pentru propriul tau comfort din luna a cincea inainte este posibil sa adaugi la inceput 0.3 cm de tija (piesa 12) si cateva zile mai tarziu sa o schimbi cu 0.5 cm tija (piesa 11) pentru a face tractiunea mai progresiva.

In prima zi, ca practica, fixeaza si scoate dispozitivul de zece ori la rand. In caz de curbura este recomandat sa pozitionam dispozitivul departe de curbura. La fiecare doua ore dispozitivul va trebui scos pentru a permite tesuturilor sa se relaxeze. Dupa luna a cincea aceasta perioada de pauza se va face la fiecare ora si jumătate. Foloseste aceasta perioada pentru a masa incet penisul. Spala dispozitivul cu sapun si apa la fiecare 4 zile.

Fii rabdator si consecvent cu tratamentul, aceasta este cheia in a-ti indeplini obiectivele. Primele rezultate pot fii observate dupa o luna si jumătate (cele 15 zile de adaptare urmata de prima luna din tratament).

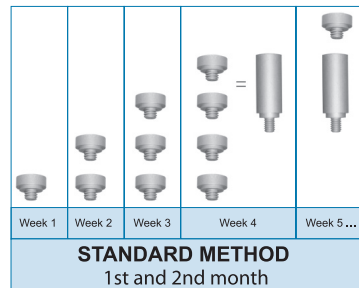

10. PRECAUTII DE UZ

Desi nu exista in mod normal disconfort, in unele zile penisul tau se poate simti inconfortabil. Nu iti fa griji, continua sa folosesti dispozitivul. Totusi, daca este necesar, poti intrerupe tratamentul pentru o zi.

Dacă simțiți durere sau disconfort, decolorare, colorare în albastru sau amorteală a glandului, îndepărtați aparatul și masați penisul. Astfel, culoarea penisului va reveni la normal și senzația neplăcută va dispărea. Dacă simțiți disconfort la baza glandului, trebuie să folosiți vată sau un bandaj pentru a proteja această zonă sensibilă.

Daca nu ai putut sa porti dispozitivul pentru 15 pana la 30 de zile, incepe tratamentul cu 1 cm (0.4") mai puțin decât mărimea la care era dispozitivul în aceea perioadă. După 5 zile maresti cu 0.5 cm (0.2") si repeta mărirea cu 0.5 cm (0.2"), din nou, după încă 5 zile. După aceasta perioadă de 10 zile de adaptare luați modalitatea aleasă.

Cand indepartati dispozitivul veti putea sesiza usoare furnicaturi, pentru care nu este nevoie sa te ingrijorezi. Se datoreaza relaxarii tesutului dupa perioada de tensiune.

Invinetirea,reactie a pielii in zona final al axului penisului (zona unde se aplica banda de silicon) sau la baza penisului (locul unde se aplica inelul de plastic) dolor,schimbari de culoare,amorteala glandului,senzatie de furnicatura,edem sau retinere de lichid in glandul,ulcer,iritare,inflamatie,disconfort sunt considerate riscuri reziduale.daca unul di aceste riscuri reziduale se produce la utilizatea aparatului se recomanda oprirea utilizarii si urmati recomandari pentru cazul coraspunzator in care se afla expus in sectiunea 13 in acest manual de instructiuni.

Nu folositi **Andropenis®**:

-  in timp ce dormiti
-  in timp ce luati parte la activitati fizice sau sportive
-  sub influenta efectelor drogurilor sau alcoolului
-  daca aveti ulcer, boli cu transmisie sexuala sau rani in zona genitala
-  dacă nu aveți putere în mână sau dacă aveți dificultăți în manipularea dispozitivului
-  in timpul actului sexual

Mentineti cu strictete standardele de igiena pe durata folosiri dispozitivului.

Indepartati dispozitivul cand urinati sau defecati.

Daca aveti o erectie in timp ce folositi dispozitivul, nu va faceti griji: il veti simti doar un pic mai strans.

Daca observati zone albe pe glande, nu va faceti griji: acestea sunt zone de edem sau retineri de fluide datorita faptului ca bucla este prea stransa. Masati zona si ele vor disparea.

IMPORTANT: Folosirea medicatiei pentru stimularea cresterii parului sau pentru a-l intarii, medicatiei pentru tratarea depresiei, medicamente pentru dormit, tranchilizante si sedative pot diminua semnificativ eficacitatea Andropenis-ului.

Incapacitatea de a avea o erectie suficientă pentru un act sexual poate indica o problemă medicală gravă. Consultați medicul curant pentru a evita o întârziere potențial dăunătoare în stabilirea diagnosticului.

11. UNGUENTE

Sistemul de fixare **Andropenis®** al glandului poate duce, în cazuri rare, la iritații și disconfort în zonă. Pentru a preveni aceasta trebuie să folosiți măsuri de precauție și banda componentă **Androcomfort®** furnizată. În caz de apariția ziselor iritații, și ținând cont de la opinia specifică a medicului dumneavoastră, va recomandăm o serie de unguente ce se pot cumpăra de forma preventivă.

UNGUENT ANTI-IRITANT/ANTIBIOTIC

În caz de iritație minora învinetirea pielii penisului, reacție a pielii în partea finală a axului penisului (locul aplicării benzii de sili-con) sau la baza penisului (locul aplicării inelului de plastic): aplica un unguent pe durata nopții și utilizează aparatul pe durata zilei până ce dispar simptomele, dacă aceste simptome continuă, consultați medicul dumneavoastră.

UNGUENT CICATRIZANT/CU OXID DE ZINC

Dacă se formează o rană sau o ulcerare:

- ❗ Nu folosiți aparatul timp de 4 zile. Aplicați unguentul anti-iritant de două ori pe zi, dimineața și după-amiaza și cel pentru cicatrizare noaptea. Dacă rana persistă, nu mai folosiți aparatul și contactați medicul curant.

UNGUENT ANTI-INFLAMATOR

Dacă oricare inflamație o edemă pare în glandul la baza penisului sau în zona pubiană aplicați un unguent anti-inflamator, precum unguentul comercial denumit "cortaid". Unguentul anti-inflamator de asemenea constituie un tratament valid pentru cazurile de reținere de lichide în glandul.

CREMĂ HIDRATANTĂ

Dacă simțiți disconfort, masați penisul cu o cremă hidratantă timp de 5 minute în fiecare noapte cu mișcări ușoare de întindere.

AVERTISMENT

Dacă vreo una din simptomele menționate anterior continuă după trei zile, dumneavoastră simțiți oarecare durere, sau notați oarecare înroșire, umflare sau febră, sunați imediat medicul dumneavoastră.

Contraindicații folosirii aparatului împreună cu unguente sau creme pe penis care conțin anestezice topice (lidocaină, xilocaină, ...).

Folosirea acestui produs întrunește necesitățile specifice ale fiecărui pacient pentru aplicarea medicală și chirurgicală, nu este un aparat de uz general care să necesite concursul unui specialist la prima plasare și supravegherea unui medic generalist pentru restul tratamentului. Dispozitivul este în general folosit în aplicarea cosmetică, în acest caz, sfatul medicului și supravegherea sunt doar sugerate ca o opțiune. Dacă pacientul semnalează orice anomalie în timpul folosirii, trebuie să consulte un medic.